


# Joystick

## Een muisalternatief voor personen met ernstige coördinatieproblemen

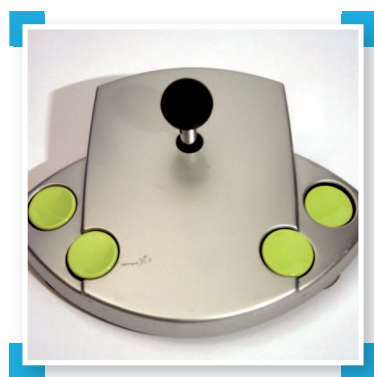

Funkey Joystick



Traxsys Joystick Plus

Een joystick is een soort stuurknuppel. Als je de knuppel beweegt, beweegt ook de muiscursor op het computerscherm. Daarnaast zijn er een aantal knoppen aanwezig die de verschillende muisfuncties kunnen uitvoeren. De knoppen staan meestal vrij ver van de knuppel af, soms zijn ze zelf afgeschermd door een rooster. Hierdoor vermijd je ongewenste kliks. Er bestaan heel wat verschillende soorten joysticks: zeer robuuste exemplaren, joysticks die je bedient met extreem weinig kracht en beperkt bewegingsbereik, joysticks die je met de kin of de mond kan bedienen, ... .

## Informatie van MODEM

- Een joystick geeft meer steun aan de hand. Het is daardoor een goede oplossing voor mensen met zwaardere motorische beperkingen.
- Heel wat mensen met ernstige motorische beperkingen hebben al ervaring met een joystick via hun elektrische rolwagen. Soms kan je zelfs de joystick van de rolwagen gebruiken om een computer te bedienen.
- Een minpunt is dat een joystick trager en omslachtiger is in vergelijking met een gewone muis of een trackball.
- Joysticks zijn dikwijls vrij duur en zijn zeker niet altijd de enige goede oplossing. Vraag best advies en probeer ze uit voor je ze koopt.
- De Funkey Joystick bestaat uit een stevige kunststof behuizing waarin een robuuste joystick en vier functieknoppen zitten.
  - De muiscursor kan slechts in acht richtingen bewegen (boven, onder, links, rechts en de vier diagonalen).
  - Het toestel wordt geleverd met 2 handgrepen: een zwarte bol en kleinere, opvallende rode greep.
  - Met de bijgeleverde zuignappen kan je de joystick op de ondergrond vastzetten.
  - Als je de Funkey Joystick op de computer wil aansluiten, heb je een extra schakelkast nodig (zie 2.3.3.2). Hiermee kan je ondermeer de bewegingssnelheid van de cursor gemakkelijk regelen.

- De Traxsys Joystick Plus is een stevige joystick met zes knoppen en een afdekplaat.
  - Deze joystick kan de muiscursor in alle richtingen laten bewegen.
  - De snelheid van de cursor kan je gemakkelijk op het toestel instellen.
  - De knoppen zijn afgeschermd met een rooster. Zo vermijd je ongewenste muiskliks.
  - Deze joystick is minder geschikt voor mensen die heel veel ongecontroleerde bewegingen maken en daardoor ruw met het toestel omgaan.
  - Er worden drie verschillende handgrepen bijgeleverd: een grote gele bal, een T-vorm of een gewone zwarte dop.
  - De Traxsys Joystick (Plus) kan je rechtstreeks aansluiten op de computer.

## Kijk ook eens bij

2.1.2.2 Trackball

2.3.3.2 Multikey, Icon III en Joykabel

## Technische gegevens

	Funkey Joystick	n-Abler
<b>Afmetingen</b>	20 x 25 x 10 cm hoogte hendel: 4,5 cm diameter knop: 4 cm	14 x 22,5 x 7 cm hoogte hendel: 7,5 cm afmeting knop: 2 x 2 cm
<b>Aantal knoppen</b>	4	6
<b>Knopfuncties</b>	linkermuisknop rechtermuisknop dubbelklik slepen	linkermuisklik rechtermuisklik slepen dubbelklikken richting vastzetten snelheid regelen
<b>Speciale versie</b>	Enkel via de Icon III	5 losse schakelaars aan te sluiten via meegeleverd schakelkastje (alle knopfuncties behalve snelheid regelen)

## Verdeler

- Funkey Joystick (€ 280) is verkrijgbaar bij Skil ([www.skil-nv.com](http://www.skil-nv.com)) en Edupro ([www.edupro.nl](http://www.edupro.nl))
- Traxsys Joystick (€ 430) is verkrijgbaar bij de Hulpmiddelen centrale, Skil en Edupro